



WeWoThom Typ MP Premium

Hochton-Frequenz-Therapie Gerät

Gebrauchsanleitung-Kurzfassung

Diese Kurzfassung wurde zum schnelleren Verständnis nach bestem Wissen aus der Originalversion von WeWoThom GmbH von Rogan Medical GmbH erstellt. Für Fehler irgendwelcher Art insbesondere Übersetzungsfehler können wir keine Haftung übernehmen.

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte aus der deutschen

https://www.roganmedical.ch/upload/WeWoThom_Gebrauchsanweisung_Deutsch.pdf

oder englischen Originalfassung.

https://www.roganmedical.ch/upload/WeWoThom_Gebrauchsanweisung_English.pdf

Änderungen vorbehalten!

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | Einleitung | 2 |
| 2. | Wesentliche Eigenschaften | 2 |
| 3. | Bestimmungsgemässer Gebrauch | 2 |
| 4. | Sicherheitshinweise..... | 2 |
| 5. | Transport, Gebrauch, Reinigung, Elektroden- und Batteriewechsel..... | 3 |
| 6. | Symbolerklärung | 4 |
| 7. | Geräteansicht:..... | 4 |
| 8. | Produktbeschreibung | 5 |
| 9. | Funktionsweise | 5 |
| 10. | Informationen zur Behandlung | 5 |
| 11. | Entsorgung..... | 6 |
| 12. | Technische Daten | 7 |
| 13. | Hinweise | 7 |

1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie WeWoThom MP gewählt haben. Bitte halten Sie sich immer genauestens an diese Anweisungen.

Hochton-Frequenz-Therapie

Die Hochton-Frequenz-Therapie wirkt regulierend und stimulierend mittels bio-elektrischer und bio-chemischer Vorgänge auf den Zellverband.

Bitte vergessen Sie nicht, dass Schmerzen Symptome einer ernsthaften Krankheit sein können. Zur medizinischen Beratung fragen Sie bitte Ihren Arzt. Die Methode des WeWoThom MP ist eine nicht-medikamentöse Behandlung von Schmerzen und sollte niemals einen notwendigen Arztbesuch ersetzen.

Das Ihnen vorliegende System WeWoThom MP ist ein Therapiegerät der Hochton-Frequenz-Therapie. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der der Behandlung mit WeWoThom und ein schmerzfreies Leben.

2. Wesentliche Eigenschaften

- Geringes Gewicht
- Kompaktes Gehäuse
- Hochwertige und einfach handhabbare Klebeelektroden
- Netzunabhängiger Betrieb mit Batterie-Knopfzelle
- Bis zu 250 Behandlungsstunden ohne Batteriewechsel
- Einfache Bedienung
- Eingestellte Behandlungsdauer jeweils ca. 6 Stunden

3. Bestimmungsgemässer Gebrauch

Das Therapiegerät WeWoThom MP ist nur für die äussere Anwendung bei Behandlung von Schmerzen bestimmt. Es sollten nicht mehr als 3 Geräte von einer Person gleichzeitig benutzt werden.

Das WeWoThom ist für folgende Anwendungen als Medizinprodukt zugelassen:

- Gelenk- und Rückenschmerzen
- Muskelschmerzen und – spasmen
- Schmerzen in Zusammenhang mit Arthrose und Arthritis
- Sportverletzungen
- Menstruationsbeschwerden

Nebenwirkungen:

Nach Langzeitbehandlungen können vereinzelt Hautreizungen auftreten. In diesen Fällen sollte die Behandlung für ca. 12 Stunden unterbrochen werden. Die Hautreizungen klingen dann wieder ab.

4. Sicherheitshinweise

Achtung:

Dieses Produkt sollte bei folgenden Personen und Umständen niemals benutzt werden:

- Personen, die eine akute Sepsis haben (Blutvergiftung)
- Personen mit Herzschrittmacher oder Defibrillator
- Personen, die schwanger sind
- Kinder unter 12 Jahre nur unter Aufsicht von Erwachsenen
- Personen während einer Magnetresonanz-Untersuchung (MRT)
- Personen während der Behandlung mit einem Hochfrequenz-Chirurgiegerät

- Zu einem Kurzwellen- oder Mikrowellen Therapiegerät sollte ein Abstand von 1 m eingehalten werden

Folgende Punkte müssen beachtet werden:

- Die Elektroden dürfen nur auf unverletzte Haut geklebt werden
- Die Elektroden sollen nicht direkt auf die Halsschlagader geklebt werden
- Um eine lange Betriebszeit zu sichern, sollten die Elektroden niemals an der leitfähigen Klebefläche direkt verbunden werden
- Keine Reinigung mit scharfen Putzmitteln
- Kein Öffnen des Gerätes (ausser Batteriefach)
- Für die Behandlung dürfen nur die mitgelieferten Haftelektroden eingesetzt werden
- Durch bestimmungsgemässen Gebrauch ist dafür zu sorgen, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät eindringen können (z.B. Gerät nicht beim Baden oder Duschen verwenden)

Warnung:

Ein Batteriewechsel bzw. die Reinigung darf nicht durchgeführt werden, wenn das Gerät mit dem Körper verbunden ist.

5. Transport, Gebrauch, Reinigung, Elektroden- und Batteriewechsel

Bitte beachten Sie, dass eine entgeltliche Rückgabe des Gerätes nach dem Öffnen des Hygienesiegels auf der blauen Box aus hygienischen Gründen nicht mehr möglich ist.

Festgelegte Umgebungsbedingungen für Transport und Lagerung:

Das Gerät ist im Temperaturbereich -25°C bis +75°C bei einer relativen Luftfeuchte von bis zu 93 % ohne Kondensation zu transportieren und zu lagern.

Zum Reinigen kann ein fusselfreies Tuch benutzt werden.

Sollten die Elektroden nach längerer Lagerung eingetrocknet sein (nur in diesem Fall), können Sie die Klebefähigkeit verbessern, indem Sie einige wenige Tropfen Leitungswasser auf die Klebefläche geben.

Vorsicht: Nicht die Klebeschicht abspülen!


Die Elektroden können leicht von Ihnen selbst gewechselt werden. Ersatz erhalten Sie in unserem Webshop www.roganmedical.ch

Überprüfen Sie nach dem Einschalten des Geräts, ob das Lämpchen grün blinkt. Wenn das Lämpchen rot blinkt, ist das ein Hinweis, dass die Batterie demnächst leer ist. Sie können die Behandlung trotzdem durchführen. Legen Sie für die nächste Behandlung eine neue Ersatzbatterie (Batterie-Typ CR2032, 3V) bereit. Vor der nächsten Behandlung, spätestens jedoch, wenn das Lämpchen nicht mehr leuchtet/ blinkt, tauschen Sie bitte die Batterie wie im Folgenden beschrieben.

Das Gerät ist entsprechend Prüfung IP22 geschützt (Schutzgrad):

- gegen feste Fremdkörper IP2X
- gegen Wasser IPX2

Batteriewechsel:

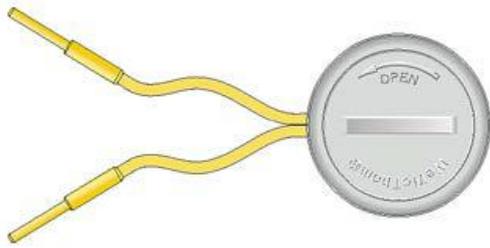

Zum Wechseln der Batterie (Batterie-Typ CR2032, 3V) drehen Sie mit Hilfe einer Münze oder der neuen Batterie den Deckel des Batteriefachs (gegenüber dem Schalter und der Leuchtdiode) entgegen dem Uhrzeigersinn, bis er sich anhebt.

Achtung: Achten Sie darauf, dass während des Batteriewechsels keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen kann!



Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab und entnehmen Sie die darunter liegende Knopfzelle. Danach legen Sie die neue Knopfzelle (mit der „+“

Seite nach oben Richtung Deckel) ein. Beim Verschluss des Deckels achten Sie bitte darauf, dass die „Klemmen“ am Deckel auf die Aussparungen im Gehäuse gelegt werden. Befestigen Sie den Deckel wieder mit Hilfe einer Münze oder der entnommenen Batterie durch Drehen im Uhrzeigersinn.

Warnung. Öffnen Sie NICHT das Gerät zwischen dem grauen und hellen Gehäuseteil!

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise erlischt der Garantieanspruch. Der Hersteller ist nur dann für Sicherheit, Zuverlässigkeit und fehlerfreie Funktion verantwortlich, wenn der Gebrauch des Gerätes gemäss der Gebrauchsanweisung erfolgt und keine unsachgemässen Eingriffe am Gerät vorgenommen wurden.

6. Symbolerklärung

Siehe:

https://www.roganmedical.ch/upload/WeWoThom_Gebrauchsanweisung_Deutsch.pdf

oder

https://www.roganmedical.ch/upload/WeWoThom_Gebrauchsanweisung_English.pdf

7. Geräteansicht:



8. Produktbeschreibung

siehe: www.roganmedical.ch

9. Funktionsweise

Die Hochton-Frequenz-Therapie mit WeWoThom MP wirkt regulierend und stimulierend mittels bio-elektrischer und biochemischer Vorgänge auf den Zellverband.

Die Zellen werden mit körpereigenen Wirkstoffen versorgt, daher kann die Einnahme von Medikamenten oftmals entfallen. Der Körper kann sich wieder selbst helfen. Bei Arthrose wird zum Beispiel der im Gelenk noch vorhandene Knorpel wieder besser versorgt, elastischer und er erhält seine Stossdämpfereigenschaft zumindest teilweise zurück. Die Schmerzen können sich dadurch verringern, und das Gelenk muss nicht mehr geschont werden. Entzündungen und Schwellungen, die die Ursache der Schmerzen sein können, verringern sich bzw. werden abgebaut. Der Patient kann sich wieder besser bewegen.

10. Informationen zur Behandlung

Vorbereitung der Haut:

Die Haut sollte an der zu behandelnden Stelle gereinigt, trocken und möglichst fettfrei sein.

Die Elektroden dürfen nur auf unverletzte Haut geklebt werden.

Die zu behandelnde Stelle sollte möglichst zwischen den Elektroden oder darunter sein.

Als Abstand der Elektroden auf der Haut kann (z.B. bei der Behandlung der Wirbelsäule) ein-Finger-breit oder enger gewählt werden.

Die Elektroden dürfen sich nicht direkt berühren.

Einschalten des Gerätes:

Das Gerät wird eingeschaltet durch Druck (ca. 2s) des orangenen Tasters in der Mitte des Gehäuses bis das Lämpchen blinkt.

Der eingeschaltete Betriebszustand wird durch grünes Blinken des Lämpchens (LED) angezeigt. Wenn das Lämpchen rot blinkt, ist das ein Hinweis, dass die Batterie demnächst leer ist.

Behandlung:

Nach dem Einschalten arbeitet das Gerät ca. 6 Stunden, sollte es nicht vorher durch erneutes längeres Drücken des Tasters ausgeschaltet worden sein. Wenn die Behandlungsdauer über 6 Stunden hinausgehen soll, so ist das System an der Stelle zu belassen und wieder einzuschalten. Die Kontrolle des Blinkens nach dem Einschalten ist empfohlen. Das WeWoThom MP kann auch vor dem Anlegen der Elektroden eingeschaltet werden. Anfangs empfiehlt es sich, täglich 6 Stunden zu behandeln (bei Bedarf auch länger). Bei späterem Nachlassen der Beschwerden können die Abstände zwischen den Behandlungen vergrößert oder die Behandlungszeiten verringert werden. Die Prozesse zur Zellkommunikation und der daraus folgenden Schmerzbekämpfung und Regulation laufen ab, ohne dass wir sie spüren. Auch wenn Sie nichts spüren, wirkt WeWoThom mit unbegrenzter Eindringtiefe.

Beenden der Behandlung:

Zum Entfernen der Klebeelektroden von der Haut beginnen Sie an einer Ecke diese leicht abzuziehen. Bitte ziehen Sie niemals an den Kabeln! Kleben Sie die Klebeelektroden anschliessend wieder auf die Plastikträger, schalten Sie das Gerät ggf. aus (falls es sich nicht bereits selbsttätig ausgeschaltet hat) und legen Sie es in die blaue Aufbewahrungsbox.

Ausschalten des Gerätes:

WeWoThom MP schaltet sich nach ca. 6 Stunden Behandlungszeit selbsttätig aus. Wenn der Betrieb des Gerätes vor Ablauf der 6 Stunden beendet werden soll, muss der Taster


länger gedrückt gehalten werden, ca. 6 Sekunden (währenddessen blinkt das Lämpchen nicht mehr), bis das Lämpchen grün aufleuchtet. Dann bitte den Taster loslassen. Das Lämpchen erlischt, und das Gerät ist ausgeschaltet.

Beispiele zur Anwendung der Elektroden:


- Schmerzende Verspannungen im Nacken
- Schmerzen im Rücken
- Schmerzen im Knie oder in der Schulter
- Menstruationsbeschwerden (ohne Abbildung) -Applikation am Unterbauch

Nachfolgend werden einige Anwendungen im Bild dargestellt:

Behandlung an der Schulter

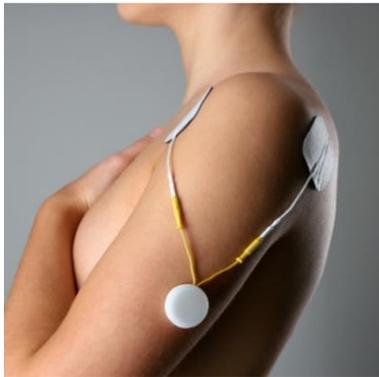

Behandlung am Unterschenkel

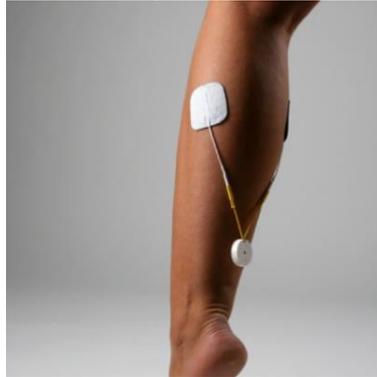

Behandlung am Knie



Behandlung an der Hüfte



Behandlung an der Wirbelsäule



Behandlung am Nacken/Halswirbel



Weitere Beispiele finden Sie Auf der Webseite:

https://www.roganmedical.ch/upload/WeWoThom_Infomappe_Deutsch.pdf

11. Entsorgung

Im WeWoThom MP befindet sich als Energiequelle eine Batterie- Knopfzelle, die wie andere Knopfzellen, z.B. in elektronischen Uhren, zu entsorgen ist.

Dieses Gerät trägt das Recycling-Symbol gemäss der EU-Richtlinie 2002/96/EC

12. Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Produktname | WeWoThom Typ MP |
| Masse | ca. 15 g inkl. Elektroden |
| Geschätzte Ausgangsspannung | 3 Volt SS bei ca. 25µA |
| Energiequelle im Gerät | 3V Lithium Batterie CR2032 |
| Betriebsdauer | bis zu ca. 250 Stunden |
| Aufbewahrung | bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort. |
| Elektroden | Nichtsterile Klebeelektroden |
| Einzelimpulsfrequenz | 4 kHz bis 12 kHz |
| Amplitude | 1,3 V |
| Impulsgruppenbreite | 40 ms bis 1 s |
| Impulsgruppenfrequenz | 1 Hz bis 22 Hz |
| Lastimpedanz | 500 Ohm |
| Schutzart IP 22 | IPX2 Schutz gegen Wasser |
| Medizinprodukt | Klasse IIa |

Das WeWoThom MP entspricht der Richtlinie RL 93/42 EWG:

13. Hinweise

- Medizinisch elektrische Geräte unterliegen besonderen Vorsichtsmassnahmen hinsichtlich der EMV. Die folgenden EMV- Hinweise sind zu beachten bei der Installation und Inbetriebnahme des Gerätes.
 - Tragbare und mobile HF-Kommunikationseinrichtungen können medizinisch elektrische Geräte beeinflussen.
 - Das Gerät sollte nicht unmittelbar neben oder mit anderen Geräten gestapelt angeordnet verwendet werden. Falls dies jedoch erforderlich ist, muss das Gerät beobachtet werden, um den bestimmungsgemäßen Betrieb in dieser Anordnung zu überprüfen.
-
- a) Leitlinien und Herstellererklärung - Elektromagnetische Aussendungen entnehmen Sie bitte aus der Deutschen oder englischen Originalfassung
 - b) Leitlinien und Herstellererklärung - Elektromagnetische Störfestigkeit entnehmen Sie bitte aus der Deutschen oder englischen Originalfassung
 - c) empfohlene Schutzabstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten und dem WeWoThom MP entnehmen Sie bitte aus der Deutschen oder englischen Originalfassung

Bei Fragen zur Anwendung oder Funktionsweise wenden Sie sich bitte an:

WeWoThom GmbH, Robert - Koch-Str. 3, 15526 Bad Saarow, info@wewothom.de
Die Hotline ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr unter der Tel.-Nr.: +49 (0) 33631 439030 erreichbar.

Oder Rogan Medical GmbH, 6343 Rotkreuz, +41 41 79 87 77 54, info@roganmedical.ch
Wenn Sie uns nicht erreichen können, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht. Wir melden uns schnellst möglich bei Ihnen.

Voraussetzung für die Garantieleistung ist, dass sämtliche Hinweise des Herstellers in der Gebrauchsanweisung zum Gerätebetrieb beachtet wurden.

Geltendmachung und Abwicklung

Diese Garantie ist nur gültig bei Vorlage der Originalrechnung oder der Kaufquittung (mit Kaufdatum, Name des Produktes, Seriennummer und welches Gerät Sie erworben haben

- a) die Seriennummer Ihres Gerätes
- b) Ihre vollständige Adresse (PLZ, Ort, Strasse)
- c) Ihre Telefon- u. ggf. Fax-Nummer
- d) gegebenenfalls Ihre E-Mail-Adresse

Im Rahmen dieser Garantie sind weitere Ansprüche des Käufers über die hierin ausdrücklich genannten Garantieleistungen hinaus ausgeschlossen.

Rogan Medical GmbH, Lettenstrasse 7, 6343 Rotkreuz, www.roganmedical.com

November 2019